

植込デバイスの創部圧迫バンド

県立姫路循環器病センターマスコット

あじさリーナ

# ハート♡バンド



ペースメーカー・植込型除細動器の

新規植込・交換の術後に使用する創部圧迫バンドです

- ・伸縮ベルトで長さ調整可能
- ・左右兼用



■ ハートバンド セット内容 (3点)

本体 (内ポケット2箇所)



伸縮ベルト



ジェル



■ 使用方法

- ① 内側ポケットにジェルを入れて腕を通す
- ② 伸縮ベルトで前胸部と後背部を固定する
- ③ 右側植込みの場合は、反対側のポケットにジェルを入れる



- ・ペースメーカー・植込型除細動器の手術後に創部を圧迫するためのバンドです。
- ・バンド使用途中で違和感や痛みを感じた場合、その他皮膚のかぶれ等理由を問わず異常が発生した場合は、直ちに使用を中止してください。
- ・必ず下着もしくは衣服の上に装着し、直接肌にあたらないようにしてください

品名	規格	型式	入数	
ハートバンド	Mサイズ	5167-1230	1個/袋	腕回り ~30cm 胸囲 80-110cm
ハートバンド	Lサイズ	5167-1240	1個/袋	腕回り ~46cm 胸囲 90-120cm

■ 参考価格 1個 : 2,500円 (税込 2,750円)



宮野医療器株式会社

TEL : 078-371-2310

参考文献 : 2015年ペーシング治療研究会 兵庫県立姫路循環器病センター 田中奈緒子  
 圧迫バンドによるデバイス植込み術後の血腫予防効果について

参考文献 : Kiuchi K, Okajima K, Tanaka N et al. Novel Compression Tool to  
 Prevent Hematomas and Skin Erosions After Device Infection. Circ J2015;79:1727-2732

※本品は兵庫県立姫路循環器病センターと株式会社セルヴァンとの共同開発品です。

Ver.201812